


SLIM-LINE

909100

How can I deactivate the auto-off function?

Press and hold "Tare"-key for six seconds

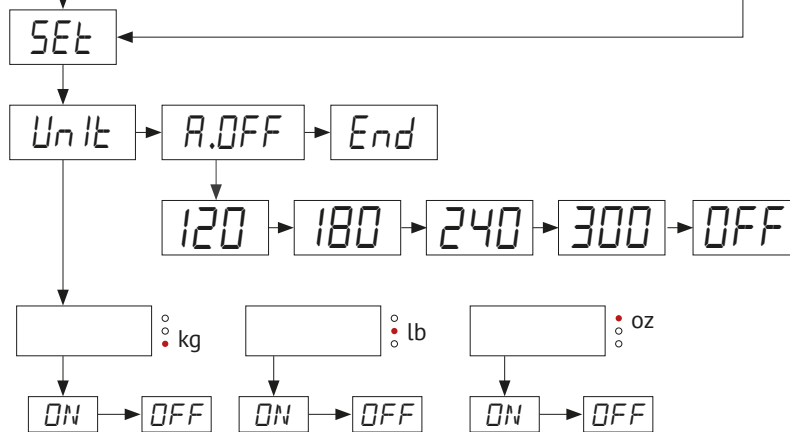

Note:

1. Press "Tare"-key for confirmation. →
2. Press "Unit"-key for selection. ↓
3. The scale is default set to 120 seconds auto-off.
4. The scale is default set to show two different units (kg/lb).

Wie kann ich die Auto-Off-Funktion deaktivieren?

Drücken und halten Sie die „Tare“-Taste für 6 Sekunden

Hinweis:

1. Drücken Sie die „Tare“-Taste zum Bestätigen. →
2. Drücken Sie die „Unit“-Taste zum Auswählen. ↓
3. Die Waage ist vom Werk mit 120 Sekunden Auto-Off eingestellt.
4. Die Waage zeigt vom Werk aus zwei unterschiedliche Einheiten (kg/lb)

Where can I find the battery compartment?

The battery compartment is located on the underside of the scale.



Wo finde ich das Batteriefach?

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der Waage.



EICKEMEYER®

GERMANY | Eltstraße 8 | 78532 Tuttlingen | Deutschland | T +49 7461 96 580 0 | F +49 7461 96 580 90 | info@eickemeyer.de | www.eickemeyer.de

SWITZERLAND | Sandgrube 29 | 9050 Appenzell | Schweiz | T 071 788 23 13 | F 071 788 23 14 | info@eickemeyer.ch | www.eickemeyer.ch

UNITED KINGDOM | 3 Windmill Business Village | Brooklands Close | Sunbury-on-Thames | Surrey | TW16 7DY | UK | T 020 8891 2007 | www.eickemeyer.co.uk

DENMARK | Solbakken 26 | Hammelev | 6500 Vojens | Danmark | T +45 70 20 50 19 | info@eickemeyer.dk | www.eickemeyer.dk

NETHERLANDS | Bellweg 44 | 4104 BJ Culemborg | Nederland | T +31 345 58 9400 | info@eickemeyer.nl | www.eickemeyer.nl

ITALY | Via G. Verdi 8 | 65015 Montesilvano (PE) | Italia | T 085 935 4078 | F 085 935 9471 | info@eickemeyer.it | www.eickemeyer.it

POLAND | Al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | T 22 185 55 76 | F 22 185 59 40 | info@eickemeyer.pl | www.eickemeyer.pl

CANADA | 617 Douro Street, Suite #205 | Stratford | Ont. | Canada | N5A 0B5 | T +1 519 273 5558 | F +1 519 271 7114 | info@eickemeyervet.ca | www.eickemeyercanada.ca